




DILASTOM® est introduit à l'aide d'un lubrifiant au moyen d'une manœuvre appropriée (vissage)

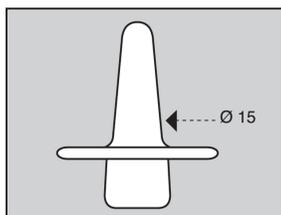

Dilatateur DILASTOM de calibre inférieur

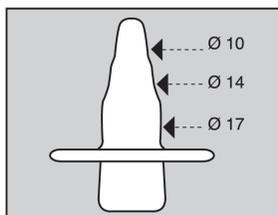

Dilatateur DILASTOM de calibre supérieur

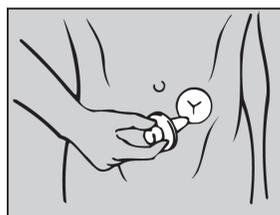

Mode d'emploi des dilateurs DILASTOM

De plus, la sténose rend le lavage assez problématique à cause de la difficulté d'introduire le cône et l'eau de lavage, ce qui oblige parfois à accomplir des opérations même dangereuses.

La forme conique et les parois lisses du DILASTOM® permettent au dilateur, après avoir été introduit, de demeurer facilement dans sa position au moyen d'une simple pression exercée de l'extérieur sur la base du dilateur.

Le DILASTOM® reste dans sa position pendant 5-10 minutes, selon l'ordonnance du médecin, et 2-3 fois par jour.

Par rapport aux conseils donnés par le spécialiste, la dilatation doit être effectuée régulièrement tous les jours pour des cycles de 1-2 mois.

Le dilateur DILASTOM® est fourni dans un emballage pratique contenant deux dilateurs ; d'abord, on utilisera le dilateur de calibre inférieur et ensuite le dilateur de calibre supérieur.

Le DILASTOM® est réalisé en plastique dur, conforme aux valeurs limites prévues par les essais chimiques de la Pharmacopée Officielle.

Le but d'une thérapie de dilatation est de bloquer le rétrécissement progressif de l'orifice extérieur de la colostomie.

Le dilateur de stomie DILASTOM® a été spécialement conçu et réalisé pour que le patient puisse effectuer chez lui la dilatation des sténoses des colostomies.

Ne contient pas de latex.