



MODE D'EMPLOI


Sangle de sécurité N° d'Article : SS-1005

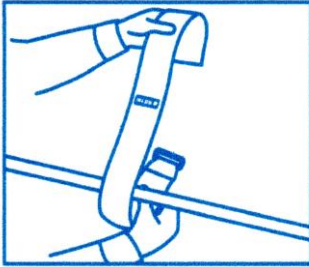

1. Passez l'anneau en métal sous la barre en métal de la table d'opération en tenant la mention « This side up » face à vous.

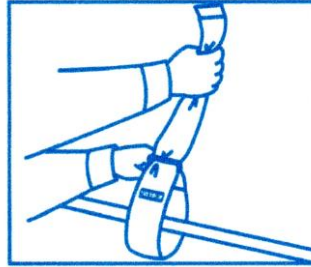

2. Passez l'autre extrémité de la sangle par-dessus la barre en métal et insérez-la dans l'anneau métallique.

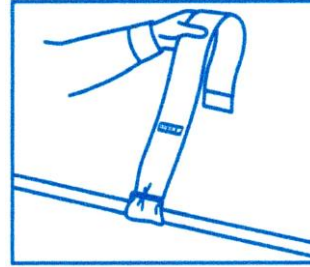

3. Bien ajuster la sangle autour de la barre en métal. Ouvrez-la fermement de l'anneau qui est en fin de sangle. Répétez les étapes 1 à 3 de l'autre côté de la table d'opération.



4. Placez les sangles par-dessus le patient et fixez chaque dispositif de fermeture afin de parvenir à une fermeture double. Les mentions « This side up » devront être vers le haut afin que vous arriviez à une fermeture adéquate.

Distribué par :



Medical Instruments Corporation France – M.I.C. France

Parc d'activités des Vallières - 41, impasse de l'Industrie -69530 BRIGNAIS

Tél. : +33 (0)4.72.31.06.08- Fax : +33 (0)4.72.31.60.39

<http://www.micfrance.com>