

Tissu pour tester les ciseaux



réf. 621431

Tissu test rouge pour ciseaux de 11,4 cm minimum
Ruban de 14 cm de large et 55 m de long

réf. 621430


Tissu test jaune pour ciseaux de 11.4 cm maximum
Ne convient pas pour les ciseaux de laparoscopie
ou super-micro. 14 cm de large et 55 m de long

Testez vos ciseaux

Conseil 1

Utiliser le pouce de la main droite et le majeur ou l'annuaire, pour que les ciseaux soient tenus comme ceux d'un chirurgien.


ne pas enfoncer le pouce
jusqu' au bout

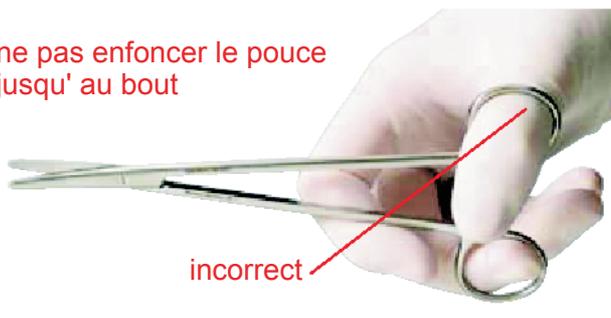

Conseil 2

Utiliser seulement le bout du pouce de la main droite et le majeur ou l'annuaire, puis couper le tissu

correct

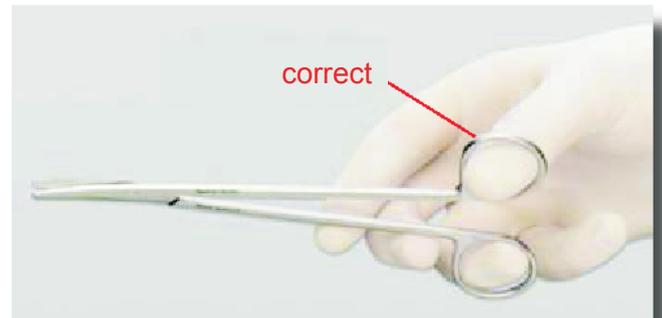

Conseil 3

Couper le tissu en utilisant les $\frac{3}{4}$ de la lame des ciseaux jusqu'au bout



Conseil 4

Après avoir coupé, retirer les ciseaux. Si les ciseaux ne pincent pas et n'accrochent pas le tissu test, alors ils sont assez tranchants.



Conseil 5

La dernière vérification porte sur le mécanisme des ciseaux. Les ciseaux doivent s'ouvrir et se fermer facilement avec souplesse, sans à coup, sans frotter ou osciller

Distribution:

Medical **I**nstruments **C**orporation

MIC France

41, rue de l'Industrie, Z.I. Nord, F-69530 Brignais, France

Tél. 04 72 31 06 08 Fax 04 72 31 60 39

e-Mail contact@micfrance.com