



Medical Instruments Corporation,
Parc d'activités des Vallières - 41, impasse de l'Industrie - 69530 Brignais / France
Tél. : +33 (0)4 72 31 06 08 - Fax : +33 (0)4 72 31 60 39
<http://www.micfrance.com>

Colon Transit 3 x 2 – Examen par marqueurs

Indication : Destiné aux enfants et adultes atteints d'une grave constipation lorsque toutes les autres investigations se sont révélées négatives. Le Colon Transit doit être utilisé uniquement sous prescription médicale.

Description

Six capsules de gélatine, contenant chacune 10 marqueurs radiopaques à base de polyuréthane et renfermant 40% de sulfate de baryum USP. Les capsules sont numérotées. Chaque paire de 2 capsules comprend des marqueurs forme géométrique identique. Les formes des marqueurs sont réparties comme suit : 1^{er} jour – des billes, 2^{ème} jour – des petits bâtonnets, 3^{ème} jour – des anneaux. **Les six (6) capsules doivent être utilisées par le patient.** Chaque capsule renferme 10 marqueurs radiopaques, qui restent absolument intacts dans le tractus digestif. Sans préparation particulière du patient, il est possible de reconstituer l'activité du colon.

Procédure : **ATTENTION** - Il est essentiel de suivre strictement la procédure suivante. L'examen demande au minimum 6 jours, en évitant les semaines de vacances ou d'autres jours pouvant interférer dans le déroulement. Aucun laxatif ne doit être utilisé avant l'examen.

- 1^{er} jour - Le patient avale deux capsules étiquetées **1** au petit déjeuner.
- 2^{ème} jour - Le patient avale deux capsules étiquetées **2** au petit déjeuner.
- 3^{ème} jour - Le patient avale deux capsules étiquetées **3** au petit déjeuner
- 6^{ème} jour - Le patient retourne à l'hôpital pour une radiographie abdominale à l'heure fixée.

Valeurs médianes et limites supérieures (m + 2 SD)
Temps de transit global et segmentaire

	Colon droit	Colon gauche	Recto-sig.	Global
Médian	6.9 h	9.1 h	18.4 h	34.4 h
M + 2 SD	24 h	30 h	44 h	67 h

S. Chaussade et coll. Gastro. Clin Biol. 1986, 10, 385-389

Vendu par : Medical Instruments Corp., Parc d'activités des Vallières - 41, impasse de l'Industrie, 69530 Brignais, France

C € 0538